

KERN MBC-E

Elektroniczna waga do ważenia noworodków i niemowląt do zastosowania w diagnostyce medycznej.

- Dostępna w dwóch wersjach:
 - » jednozakresowej o nośności 20 kg i działce 10g dla oddziałów pediatrycznych oraz położnych przeprowadzających wizyty patronażowe po porodzie,
 - » dwuzakresowa o mniejszej nośności 6/15kg z działką 2/5g dla oddziałów neonatologii i intensywnej terapii noworodka.
- Zaprojektowana do użytku mobilnego.
- Łatwa w obsłudze i utrzymaniu czystości, funkcjonalna.

Produkt medyczny do intensywnego użytku w placówkach służby zdrowia.

Deklaracja zgodności CE 0122 0297

2 lata gwarancji producenta



KERN®



**HERITAGE
MEDICAL**

urządzenia-medyczne.com.pl

Waga noworodkowa KERN MBC-E

Dokładne narzędzie pomiarowe w standardzie wyposażone w zasilanie bateryjne, dzięki czemu, pomiaru wagi dziecka można dokonać w każdym dogodnym miejscu bez potrzeby szukania gniazdka sieciowego.

prospekt produktu | Waga noworodkowa KERN MBC-E

Duża, ergonomiczna i odpowiednio wyprofilowana szalka do bezpiecznego ważenia małych dzieci.

Prosta konstrukcja wykonana z wytrzymałego i łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS odpornego na zarysowania i odkształcenia.



Podświetlany i bardzo czytelny wyświetlacz będzie szczególnie przydatny w salach z ograniczonym natężeniem światła ze względu na specjalne potrzeby najmłodszej grupy pacjentów.

Wyposażona w poziomnice i regulowane, antypoślizgowe nóżki zapewniające stabilność i rzetelne wyniki ważenia.

Prosta i szybka obsługa wagi za pomocą czytelnych i wygodnych przycisków funkcyjnych.



HERITAGE
MEDICAL

urządzenia-medyczne.com.pl

Precyzyjny pomiar i kontrola masy ciała od pierwszych chwil życia

Waga wyposażona jest w funkcje, które mają na celu wspieranie personelu medycznego i dostarczanie wiarygodnych i rzetelnych danych pozwalających na skrupulatną kontrolę rozwoju dziecka.

prospekt produktu | Waga noworodkowa KERN MBC-E



Funkcja KARMNIENIE



przysła się podczas codziennego ważenia noworodka na oddziale w celu oceny efektywności karmienia piersią oraz kontroli prawidłowego przybierania na wadze. W tym celu przed karmieniem położyć dziecko na szalce, po wyświetleniu się wagi nacisnąć pierwszy przycisk funkcji karmienia, dzięki czemu waga zapamięta wynik, następnie oddać dziecko matce by je nakarmiła. Ponownie położyć dziecko na szalce po nakarmieniu i przycisnąć drugi przycisk funkcji karmienia. Na ekranie pojawi się ilość spożytego mleka.

TARE

Funkcja TARA

By zwiększyć komfort dziecka podczas ważenia, położyć na szalce pieluszkę lub miękkiego kocyk, następnie wciśnij przycisk „TARA”. Waga się wyzeruje, a po położeniu dziecka pokaże tylko jego masę ciała.

HOLD

Funkcja HOLD

szczególnie przydatna podczas ważenia niespokojnych lub bardzo ruchliwych maluchów. Po położeniu dziecka na wagę, nacisnąć przycisk „HOLD”, a po chwili waga pokaże „zamrożoną” wartość, czyli średnią z kilku pomiarów. Gdy zdejmiesz malucha z wagi, wartość jego masy ciała będzie się wyświetlała na ekranie jeszcze przez 10 s, po czym automatycznie się wyzeruje.



HERITAGE
MEDICAL

urzadzenia-medyczne.com.pl

Waga noworodkowa KERN MBC-E

specyfikacja techniczna

Model	MBC 15K2DEM	MBC 20K10EM
Zakres ważenia (max)	6 / 15 kg	20 kg
Obciążenie minimalne	40 / 100 g	200 g
Działka elementarna (d)	2 / 5 g	10 g
Działka legalizacyjna (e)	2 / 5 g	10 g
Wyświetlacz	LCD z cyframi o wysokości 25 mm	
Czas stabilizacji pomiaru	3 s	
Czas nagrzewania	10 minut	
Temperatura pracy	od +10°C do +40°C	
Wilgotność powietrza	maksymalnie 80%, bez kondensacji	
Napięcie wejściowe	100 - 240 V, 50/60 Hz	
Funkcja „Auto Off”	do ustawienia w menu po: 3, 5, 15, 30 minutach, bez zmiany obciążenia	
Wymiary w stanie kompletnie zmontowanym z opcjonalnym wzrostomierzem	890 x 470 x 175 mm	
Wymiary w stanie kompletnie zmontowanym bez opcjonalnego wzrostomierza	600 x 407 x 120 mm	
Wymiary wyświetlacza	200 x 130 x 60 mm	
Wymiary szalki niemowlęcej	600 x 280 x 55 mm	
Ciężar netto	4,6 kg	
Zasilanie akumulatorowe (opcja)	akumulator 6 x 1.2 V 2000mA (model MBC-A08)	
Zasilanie bateryjne w standardzie	6 x 1.5 V AA	
Legalizacja zgodnie z dyrektywą 2014/42/UE	III klasa	
Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I, z funkcją pomiarową	

Informujemy iż zgodnie z prawem w przypadku zakupu wagi z legalizacją obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na jej użytkowniku. Aktualne terminy zgłaszania przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej znajdują Państwo na stronach Głównego Urzędu Miar - www.gum.gov.pl



HERITAGE
MEDICAL

urządzenia-medyczne.com.pl

Waga noworodkowa KERN MBC-E

wyposażenie opcjonalne

prospekt produktu | Waga noworodkowa KERN MBC-E



Mechaniczny wzrostomierz do montażu na wadze niemowlęcej
zakres pomiarowy 10 - 80 cm, podziałka 1 mm

KERN MBC-A01



Zestaw zagłówek/podnózek do zamontowania na szalce wagi
zwiększający bezpieczeństwo ważenia małych dzieci

KERN MBC-A05



Torba transportowa do mobilnego użytku
tylko dla wagi bez zamontowanego wzrostomierza

KERN MBC-A02



Wewnętrzny akumulator z ładowarką, zapewniający pracę
urządzenia do 40h (bez podświetlenia), czas ładowania 12h

KERN MBC-A08 + YKA-44



**HERITAGE
MEDICAL**

Sklep Medyczny · Heritage Medical · grupa e-promo

+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl